

# Posterisan® protect

## Peräpuikot

Näiden Posterisan® protect -valmistetta (lääkinällinen laite) koskevien käyttöohjeiden tarkoituksena on vastata kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla peräpuikkojen käytöstä. Jos tarvitset lisätietoja, keskustele apteekkihenkilökunnan kanssa.

Toivotamme sinulle pikaista paranemista ja oireiden nopeaa lievittymistä.

### Mitä on Posterisan® protect?

**Posterisan® protect sisältää ihoa suojaavaa yhdistettä, joka lievittää peräpukamien oireita.**

Vettä hylkivä ja ihoa suojaava yhdiste muodostaa peräaukkoon ja sitä ympäröivälle alueelle suojaavan kalvon. Sen ansiosta kipeät alueet suojataan ärsytykseltä. Samalla mekaaninen, liukastava vaikutus helpottaa myös ulostamista.

Näin voidaan ehkäistä oireiden uusiutumista.

### Mitä Posterisan® protect sisältää?

Kukin Posterisan® protect puikko sisältää ihoa suojaavaa yhdistettä, joka on valmistettu jojobavahasta (140 mg), keltaisesta mehiläisvahasta (140 mg) ja setearyyli-isononanoatista (140 mg).

Jojobavaha (jota kutsutaan myös jojobaöljyksi) hoitaa, suojaa ja silottaa ihoa edullisen rasvahappokoostumuksensa ansiosta. Se muodostaa ihon pinnalle ohuen lipidikalvon tukkimatta ihoa. Näin iho pystyy pidättämään paremmin kosteutta ja peräaukon alueen herkkä iho muuttuu kimmoisammaksi. Ihoa suojaava yhdiste hylkii vettä sisältämänsä luonnollisen keltaisen mehiläisvahan ansiosta, ja yhdisteen sisältämä setearyyli-isononanoatti pehmentää ihoa.

Lisäksi valmiste sisältää hydrattua rasvaa.

### Milloin Posterisan® protect -valmistetta käytetään?


**Posterisan® protect -valmistetta käytetään tarvittaessa.**

Suositteltu annos on yksi peräpuikko aamulla ja yksi peräpuikko illalla. Jos oireet ovat voimakkaita, peräpuikkoja voidaan käyttää tiheämminkin.

**Posterisan® protect -valmistetta voidaan käyttää turvallisesti raskauden ja imetyksen aikana.**

### Miten Posterisan® protect -valmistetta käytetään?

Peräpuikko työnnetään sormen avulla syvälle peräaukkoon, jotta sen suojaava vaikutus kestää mahdollisimman pitkään.

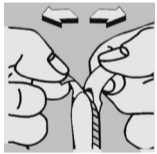

#### Peräpuikon käyttö:

Avaa repäisypakkaus yläreunasta siten, että peräpuikko on helppo ottaa pakkauksesta.

#### Huomautus:

Posterisan® protect -valmisteen käyttö voi aiheuttaa alusvaatteiden likaantumista. Tämän vuoksi suosittelemme alusvaatteiden suojaamista (esim. peräaukonsuojilla).

### Kuinka pitkään Posterisan® protect -valmistetta käytetään?

Posterisan® protect -valmistetta voidaan käyttää aina tarpeen mukaan ja enintään neljän viikon ajan ilman taukoa. Posterisan® protect -valmisteen säännöllisellä käytöllä voidaan auttaa ehkäisemään peräpukamiin liittyvien oireiden uusiutumista.

### Milloin Posterisan® protect -valmistetta ei pidä käyttää?

Älä käytä Posterisan® protect -valmistetta, jos sinulla on todettu yliherkkyys valmisteen sisältämillä ainesosilla.

Posterisan® protect -valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti muiden valmisteiden kanssa akuuttien peräaukon alueen vaivojen, kuten kutinan, pistelyn, polttelun, vuotamisen tai kivun hoitoon. Posterisan® protect -valmisteen ihoa suojaava yhdiste voi heikentää näiden valmisteiden tehoa.

### Millaisia haittavaikutuksia Posterisan® protect -valmisteella voi olla?

Käytön yhteydessä on ilmoitettu peräaukon alueen polttelua ja punoitusta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä Aboutmeds Oy:lle, lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu näissä käyttöohjeissa.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

### Millaisia varotoimia tuotteen käyttöön liittyy?

Välittömässä kosketuksessa Posterisan® protect -valmiste voi heikentää kondomien materiaalikestävyyttä huomattavasti, minkä vuoksi kondomien käyttö ei välttämättä ole turvallista.

### Mitä pakkauskokoja on saatavilla?

Posterisan® protect on saatavilla pakkauksissa, jotka sisältävät 10 peräpuikkoa.

### Miten Posterisan® protect -valmistetta säilytetään ja kuinka kauan se säilyy?

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pahvikoteloon ja folioon. Älä käytä peräpuikkoja viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Älä säilytä Posterisan® protect -valmistetta yli 25 °C:ssa.

### Nämä käyttöohjeet on laadittu 2022-05.



DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2, 12277 Berliini, Saksa

Puh.: +49 30 72082-0

Faksi: +49 30 72082-200

Sähköposti: info@kade.de

#### Edustaja:

Aboutmeds Oy, Suomi

Puh.: +358 50 4413175

info@aboutmeds.fi

# Posterisan® protect

## Suppositorier

Vi har tagit fram den här bruksanvisningen för den medicintekniska produkten Posterisan® protect i syfte att besvara eventuella frågor om dess användning. Vänd dig till apotekspersonal om du har ytterligare frågor.

Vi önskar dig en snabb återhämtning och att besvären snart avtar.

### Vad är Posterisan® protect?

**Posterisan® protect innehåller ett hudskyddskomplex för lindring av besvär i samband med hemorrojder.**

Efter användning lägger sig det vattenavstötande hudskyddskomplexet på den drabbade analregionen som ett skyddande skikt. De smärtekänsliga områdena skyddas därmed mot irritation. Samtidigt underlättas tarmrörelserna genom en mekanisk glideffekt.

Detta bidrar också till att hindra att symtomen uppstår igen.

### Vad innehåller Posterisan® protect?

Ett suppositorium Posterisan® protect innehåller ett hudskyddskomplex av jobobavax (140 mg), gult bivax (140 mg) och cetearylisononanoat (140 mg).

Jobobavax (kallas även jobobaolja) vårdar, skyddar och smörjer huden genom sin effektiva fettsyrsammansättning. Det bildar en mild lipidfilm på huden utan att isolera den. De fuktighetsbevarande egenskaperna höjs och hudens elasticitet i det irriterade analområdet förbättras. Det naturligt gula bivaxet ger hudskyddskomplexet en vattenavstötande verkan, medan cetearylisononanoat gör huden smidig.

Härdfett finns också bland ingredienserna.

### När ska Posterisan® protect användas?


**Posterisan® protect används efter behov.**

Rekommenderad dos är ett suppositorium på morgonen och ett på kvällen. Vid svårare besvär kan suppositorierna användas oftare.

**Det är säkert att använda Posterisan® protect under graviditet och amning.**

### Hur använder du Posterisan® protect?

Suppositorierna ska föras djupt in i analöppningen med hjälp av fingret så att den skyddande effekten kan avges under en längre tid.

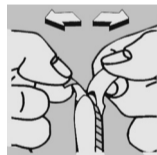

#### Öppna förpackningen:

För att använda ett suppositorium drar du isär folien på den övre änden så pass långt att suppositoriet är lätt att ta ut.

#### Anmärkning:

Under användningen av Posterisan® protect är det möjligt att kläderna blir smutsiga. Vi rekommenderar därför att du använder ett klädskydd (till exempel analskydd).

### Hur länge bör du använda Posterisan® protect?

Du kan alltid använda Posterisan® protect efter behov och upp till fyra veckor utan avbrott. Regelbunden användning av Posterisan® protect bidrar till att förebygga återkommande symtom på besvär med hemorrojder.

### När ska du inte använda Posterisan® protect?

Använd inte Posterisan® protect om du är överkänslig mot någon av dess ingredienser.

Posterisan® protect ska inte användas samtidigt med andra preparat för behandling av akuta besvär i analregionen, som klåda, obehaglig eller brännande känsla, vätska eller smärta. Det kan medföra att hudskyddskomplexet i Posterisan® protect minskar verkan av sådana preparat.

### Vilka biverkningar kan förekomma vid användning av Posterisan® protect?

Brännande känsla och rodnad i analområdet har rapporterats i samband med användning.

Om du observerar några biverkningar ska du kontakta Aboutmeds Oy, läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte listas i dessa instruktioner för användning.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att mer information gällande säkerheten för detta läkemedel blir tillgänglig.

### Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas?

Om kondomer kommer i direkt kontakt med Posterisan® protect påverkas deras hållfasthet negativt, vilket innebär att kondomanvändning inte är säkert.

### Vilka förpackningar är tillgängliga?

Posterisan® protect finns tillgängligt i förpackningar med 10 suppositorier.

### Hur ska Posterisan® protect förvaras och vad är dess hållbarhetstid?

Förfallodatumet anges på kartongen och på folien. Använd inte suppositorierna efter detta datum.

Förvara inte Posterisan® protect i temperaturer över 25 °C.

**Den här bruksanvisningen togs fram i 2022-05.**



DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH  
Rigistraße 2  
12277 Berlin  
Tyskland  
Tel.: +49 30 72082-0  
Fax: +49 30 72082-200  
E-post: info@kade.de

#### Ombud:

Aboutmeds Oy, Finland  
Tel.: +358 50 4413175  
info@aboutmeds.fi