

Wellnose® nenävoide

Lue käyttöohje huolella, sillä se sisältää tärkeää tietoa potilaalle lääkinnällisen laitteen Wellnose® nenävoiteen käytöstä. Pidä se tallessa siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

Käyttöohje Wellnose® nenävoide 15 g Lääkinnällinen laite



1. Mikä on Wellnose® nenävoide?

Wellnose® nenävoide on lääkinällinen laite, jolla on kosteuttavia ominaisuuksia ja joka tukee limakalvojen ja nenän ympärillä olevan ärtyneen ja halkeilevan ihon riittävän kosteuden ylläpitämistä. Voiteen sisältämät ainesosat muodostavat kalvon, joka suojaa ulkoisten tekijöiden haitallisilta vaikutuksilta ja siten ärstytystä vastaan. Wellnose® nenävoide on lisäksi rikastettu prebiootilla, Biolin P:llä, joka tukee fysiologisen bakteeriflooran kehitystä ja estää siten patogeenisten mikro-organismien kehittymistä.

2. Mihin Wellnose® nenävoidetta käytetään?

Kuiva nenä on yleinen ongelma lapsilla ja aikuisilla. Se voi ilmetä, jos oleskelee liian pitkään ilmastoiduissa huoneissa tai muissa paikoissa, joissa on liian alhainen kosteus, esim. lämmityskauden aikana. Kuiva nenä liittyy myös moniin sairauksiin ja allergioihin ja voi olla seurausta tiettyjen lääkkeiden käytöstä. Tämä ongelma koskee myös iäkkäitä ja kemiallisille tai ärsyttävillä aineilla altistuvia ihmisiä (esim. työpaikoilla).

Wellnose® nenävoide ei ainoastaan kosteuta, vaan myös ylläpitää limakalvojen sopivaa kosteustasoa pitempään, mikä lievittää niiden kuivuuteen liittyviä epämiellyttäviä tunteita.

Nenän limakalvo on erityisen alttiina ulkoisille tekijöille erityisesti infektioiden tai allergisten tilojen aikana, mikä aiheuttaa ärstytystä, kirvelyä tai kipua. Wellnose® nenävoiteen käyttö vähentää epämiellyttävää tunnetta luomalla suojakerroksen, joka rajoittaa ärsyttävien tekijöiden pääsyä limakalvolle. Lisäksi lääkinällistä laitetta voidaan käyttää myös halkeileville ja ärtyneille nenäluille, jotka johtuvat jatkuvasta nenän vuotamisesta infektioiden tai allergioiden aikana.

3. Annostelu ja käyttöohje

Wellnose® nenävoide tulee annostella käyttöohjeen mukaisesti. Tuote on tarkoitettu aikuisille ja yli 1-vuotiaille lapsille.

Ennen kuin käytät Wellnose® nenävoidetta, pese kätesi huolellisesti. Levitä pieni määrä voidetta, tulitkun pään kokoinen, tasaisesti nenän limakalvolle tai nenän ympärille. Käytä tarpeen mukaan useita kertoja päivässä. Voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 30 vrk, jonka jälkeen on pidettävä 7 vrk tauko.

4. Haittavaikutukset ja varoitukset

Yliherkkyys jollekin tuotteen ainesosalle. Tarkoitettu käytettäväksi nenän sisäpinnalla. Varo voiteen joutumista silmiin. Älä käytä valmistetua pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Mikäli jokin tuotteesta arveluttaa, käännä lääkäriin tai apteekin puoleen.

Jokainen vakava tuotteen käyttöön liittyvä haittatapahtuma tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen jäsenmaan viranomaiselle, jonka kansalaisesta on kysymys.

5. Säilytysohje

Säilytetään alkuperäispakkauksessa 5-25°C lämpötilassa. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

6. Koostumus

Oliiviöljy (1,00 %), purasruohöljy (1,00 %), Biolin P (2,00 %)* Muut ainesosat: vesi, vaseliini, glyseriini, parafiiniöljy, hydratut kookosglyseridit, 1,2-heksaanidoli, bis-diglyseryyllipolyasyliadiipaatti-2, glyseerystearaatti SE, E-vitamiini, karbomeeri, setearyylialkoholi, glyseerystearaatti, natriumbentsoaatti, xantaanikumi, natriumhydroksidi, EDTA

*määrä riippuu inuliinipitoisuudesta

7. Pakkauksen sisältö

Wellnose® nenävoide on pakattu muoviseen putkiloon, joka sisältää 15 g valmistettua. Yksittäisen pakkauksen sisältö: kartonkilaatikko, tuubi ja käyttöohje. Hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k. Górników street 21/26
30-819 Cracow, Puola/Polen
www.gofarm.pl



Aboutmeds Oy, Espoo, Suomi.
info@aboutmeds.fi
www.aboutmeds.fi

Pakkauksessa olevien symbolien merkitykset:

	Valmistaja		Eränumero		Säilytyslämpötila		Luettelonumero
	Jakelija		Lue käyttöohje		Lääkinnällinen laite		
	Viimeinen käyttöpäivä		Älä käytä, mikäli pakkaus on vaurioitunut		Yksilöity laitteen tunnistus		

Wellnose® nässalva

Läs bruksanvisningen noggrant eftersom den innehåller viktig information för patienten om användningen av den medicintekniska produkten Wellnose® nässalva. Spara den ifall du behöver den senare.

Bruksanvisning Wellnose® nässalva 15 g Medicinteknisk produkt



1. Vad är Wellnose® nässalva?

Wellnose® nässalva är en medicinteknisk produkt med återfuktande egenskaper som hjälper till att bevara tillräcklig fukt i slemhinnorna och i huden runt näsan som kan vara irriterad eller sprucken. Ingredienserna i salvan bildar en skyddande film som skyddar mot skadliga yttre faktorer och därmed minskar irritation. Wellnose® nässalva är dessutom berikad med prebiotikan Biolin P, som stödjer utvecklingen av den fysiologiska bakteriefloran och därmed förhindrar tillväxt av patogena mikroorganismer.

2. Vad används Wellnose® nässalva för?

Torr näsa är ett vanligt problem hos både barn och vuxna. Det kan uppstå vid långvarig vistelse i luftkonditionerade utrymmen eller andra miljöer med låg luftfuktighet, t.ex. under uppvärmningssäsongen. Torr näsa kan även vara kopplad till olika sjukdomar och allergier samt som biverkning av vissa läkemedel. Problemet är också vanligt hos äldre personer och personer, som exponeras för kemikalier eller irriterande ämnen (t.ex. på arbetsplatsen). Wellnose® nässalva återfuktar inte bara, utan hjälper också till att bibehålla en lämplig fuktnivå i slemhinnorna under längre tid, vilket lindrar obehag förknippat med torrhet.

Näsmukosan är särskilt känslig för yttre faktorer, vid infektioner eller allergiska tillstånd, vilket kan orsaka irritation, sveda eller smärta. Användning av Wellnose® nässalva minskar obehaget genom att skapa ett skyddande lager som begränsar kontakt med irriterande ämnen. Denna medicintekniska produkt kan också användas på sprucken och irriterad hud runt näsan till följd av rinnsnuva vid infektioner eller allergier.

3. Dosering och bruksanvisning

Wellnose® nässalva ska doseras enligt bruksanvisningen. Produkten är avsedd för vuxna och barn över 1 år. Innan du använder Wellnose® nässalva, tvätta händerna noggrant. Applicera en liten mängd salva, ungefär storleken av ett tändstickshuvud, jämnt på näsans slemhinna eller runt näsan. Använd flera gånger om dagen vid behov. Kan användas kontinuerligt i 30 dagar, varefter en paus på 7 dagar rekommenderas.

4. Biverkningar och varningar

Överkänslighet mot någon av produktens ingredienser. Endast för invärtes användning i näsan, undvik kontakt med ögonen. Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen. Använd inte om förpackningen är skadad. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något angående produkten.

Varje allvarlig incident relaterad till användning av produkten ska rapporteras till tillverkaren samt till behörig myndighet i det land där användaren är medborgare.

5. Förvaring

Förvaras i originalförpackning vid 5–25 °C. Förvaras oåtkomligt och osynligt för barn.

6. Innehåll

Olivolja (1,00 %), gurkörtolja (1,00 %), Biolin P (2,00 %) *

Övriga ingredienser: vatten, vaselin, glycerin, paraffinolja, hydrerade kokosglycerider, 1,2-hexandiol, bis-diglycerilpolyacryladipat-2, glycerylstearat SE, vitamin E, karbomer, cetearylalkohol, glycerylstearat, natriumbensoat, xantangummi, natriumhydroxid, EDTA

* mängden beror på inulininnehållet

7. Förpackningens innehåll

Wellnose® nässalva är förpackad i en plasttub som innehåller 15 g produkt. Förpackningen innehåller: kartong, tub och bruksanvisning. Kassera enligt lokala föreskrifter.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k. Górników street 21/26
30-819 Cracow, Puola/Polen
www.gofarm.pl



Aboutmeds Oy, Esbo, Finland.
info@aboutmeds.fi
www.aboutmeds.fi

Betydelserna av symbolerna på förpackningen:

	Tillverkare		Batchnummer		Temperaturgränser		Katalognummer
	Distributör		Läs bruksanvisningen		Medicinteknisk produkt		
	Sista användningsdatum		Använd inte om förpackningen är skadad		Enhetsidentifierare		