

(FIN) Käyttöohje
Aftavexx® -geeli 15 ml
Lääkinnällinen laite



1. Mikä on Aftavexx® -geeli

Aftavexx® -geeli on geelimuotoinen lääkinällinen laite, joka muodostaa suojakalvon suun limakalvon pinnalle. Se eristää hiertymä- tai haavauma-alueet ärsykeiltä. Geeli lievittää oireita, kuten kirvelyä ja arkuutta, joita suun aftat aiheuttavat, ja tukee limakalvon epiteelin normaalia uudistumista. Tuotetta suositellaan myös käytettäväksi suun limakalvon pieniin vaurioihin ja hiertymiin, joita aiheutuu hampasproteeseista tai oikomiskojeista. Tuote on tarkoitettu yli 1-vuotiaille lapsille ja aikuisille.

2. Mihin Aftavexx® -geeliä käytetään?

Aftainen stomatiitti on yleinen suun limakalvosairaus, jolle on ominaista yksittäisten tai monien kivulioiden hiertymien tai haavaumien esiintyminen jaksottain. Niitä peittää fibrinikerros ja ympäröi tulehtunut reunus. Muutokset esiintyvät yleensä liikkuvalla, keratiinisoitumattomalla limakalvon alueella, kuten poskien, huulten, suupohjan, suulaen ja kitalaan pehmeällä alueella. Aftojen ilmestymistä edeltää usein kirvelyn ja polttelun tunne.

Aftavexx®-geeliä suositellaan seuraavissa tapauksissa:

- **Pienet aftat (Mikuliczin aftat):** Hyvin kivuliaat, enintään 10 mm kokoiset hiertymät, yksittäiset tai useita. Paranevat arpia jättämättä 7–14 päivässä.
 - **Herpeksen kaltaiset suun haavaumat:** Lukuisia, pieniä ja usein hyvin kivuliaita hiertymiä koko suuontelon alueella. Paranevat muutamassa tai useammassa päivässä.
- Tätä lääkinällistä laitetta voidaan käyttää myös, kun suun haavaumat liittyvät seuraavaan oireyhtymään:

- **Behçetin tauti:** Oireet muistuttavat tavallisia toistuvia aftoja ja paranevat yleensä itsestään kahden viikon kuluessa jättämättä arpia. Haavaumat ovat kivuliaita ja niitä esiintyy usein kielessä, ikenissä tai poskien limakalvolla.

Geelin sisältämä hyaluronihappo suojaavine ominaisuuksineen muodostaa ärtynelle limakalvon alueelle kalvon, joka eristää sen mekaanisilta ja kemiallisilta ärsykeiltä, lievittää kipua ja kirvelyä sekä tukee limakalvon uudistumista.

3. Annostus ja käyttöohje

Käyttö: Käytä valmistetta käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli Sinulla on kysyttävää, ota yhteys lääkäriin.

Kohderyhmä: Yli 1-vuotiaat lapset ja aikuiset.

Annostus: Käytä valmistetta 3–4 kertaa päivässä aterian jälkeen.

Käyttötapa: Valmistele suun limakalvolle paikalliseen käyttöön. Pese kädet huolellisesti ennen käyttöä. Levitä pieni määrä geeliä (1–2 tippaa) suun vaurioituneelle alueelle annostelijan avulla välttämättä suoraa kosketusta vauriokohtaan. Jos vaurio on vaikeasti saavutettavissa, tuotteen voi levittää myös steriilillä sideharsotupalla tai puhtaalla sormella.

Välittömästi geelin levittämisen jälkeen älä koske hoidettuun alueeseen kielellä vähintään 3 minuuttia, jotta suojaava kalvo ehtii muodostua. Älä huuhtele suuta, juo nesteitä tai syö ruokaa vähintään 30–60 minuuttia käytön jälkeen.

Käytä aftageeliä vain oireiden paranemiseen asti, kuitenkin enintään 14 päivän ajan.

4. Varoitukset ja varotoimet

Mikäli oireet eivät helpota 14 päivän kuluessa tai pahenevat, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Jos olet raskaana, imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen käyttöä.

Hygieniasystä ja tartuntojen ehkäisemiseksi yksi tuote tulee olla vain yhden henkilön käytössä.

Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai jos pakkaus on vaurioitunut.

Vasta-aiheet:

Yliherkkyys (allergia) jollekin tuotteen ainesosalle.

Ei saa käyttää silmiin tai korvakäytävään.

Ei saa käyttää suurten haavaumien hoidossa (10–20 mm kivulias haavauma).

Ei saa käyttää vakavan kroonisen aftaisen stomatiitin tapauksessa (5–10 mm kokoisia kivuliaita hiertymiä/haavaumia, jotka paranevat osittain ja osittain ilmestyvät uudelleen eri kohtaan).

Varoitukset:

Pidä pois lasten ulottuvilta.

5. Säilytysohje

Säilytä alkuperäispakkauksessaan 15–25 °C lämpötilassa.

6. Koostumus

suurimolekyylinen natriumhyaluronaaatti, **Apuaineet:** puhdistettu vesi, glyseriini, ksylitioli, hydroksietyyliiselluloosa, bensalkoniumkloridi, kaliumsorbaatti, dinatriumedeetaatti, minttuaromi, sitruuna-aromi

7. Pakkauksen kuvaus

Aftavexx® -geeli 15 ml on pakattu muoviputkiloon, joka sisältää 15 ml geeliä. **Myyntipakkaus sisältää:** pahvipakkaus, 15 ml putkilo tekstipainatuksin ja käyttöohjeet.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k. Górników street 21/26
30-819 Cracow, Puola
www.gofarm.pl



Aboutmeds Oy, Espoo, Suomi.
info@aboutmeds.fi
www.aboutmeds.fi

Pakkauksessa olevien symbolien merkitykset:

	Valmistaja		Eränumero		Lämpötilarajat
	Jakelija		Tutustu käyttöohjeeseen		Lääkinnällinen laite
	Viimeinen käyttöpäivä		Älä käytä, mikäli pakkaus on vaurioitunut		Luettelonumero

1. Vad är Aftavexx® gel

Aftavexx® gel är en medicinteknisk produkt i gelform som bildar en skyddsfilm på munslimhinnan. Den isolerar områden med erosioner eller sår från irriterande ämnen. Gelen lindrar symtom som brännande känsla och ömhet som orsakas av afte och stödjer den normala återbildningen av slemhinnans epitel. Produkten rekommenderas också för användning på små skador och skavsår på munslimhinnan som orsakats av tandproteser eller tandställningar. Produkten är avsedd för barn från 1 år och vuxna.

2. Vad används Aftavexx® gel till?

Aftös stomatit är en vanlig sjukdom i munslimhinnan som kännetecknas av återkommande smärtsamma erosioner eller sår, ofta täckta av en fibrinbeläggning och omgivna av en inflammerad rand. Förändringarna uppträder oftast på icke-keratiniserad rörlig slemhinna, som insidan av kinderna, läpparna, munbotten, gommen och den mjuka gommen. Utbrott av afte föregås ofta av en stickande och brännande känsla.

Aftavexx® gel rekommenderas i följande fall:

- **Små aftesår (Mikulicz-afte):** Mycket smärtsamma erosioner på upp till 10 mm, enstaka eller flera. Låker utan ärrbildning inom 7–14 dagar.
- **Herpesliknande munsår:** Små, ofta mycket smärtsamma erosioner spridda i hela munhålan. Låker inom några dagar eller mer.

Den medicintekniska produkten kan även användas när munsår förekommer vid följande syndrom:

- **Behçets sjukdom:** Symtomen liknar vanliga återkommande afte och låker oftast spontant inom två veckor utan ärrbildning. Sårerna är smärtsamma och förekommer ofta på tungan, tandköttet eller munslimhinnan.

Den hyaluronsyra som gelen innehåller bildar en skyddsfilm över irriterade områden och skyddar dem mot mekaniska och kemiska irritationer, lindrar smärta och brännande känsla samt främjar slemhinnans återhämtning.

3. Dosering och bruksanvändning:

Användning: Använd produkten enligt bruksanvisningen. Kontakta läkare vid frågor.

Målgrupp: Barn från 1 år och vuxna.

Dosering: Applicera 3–4 gånger per dag efter måltid.

Användningssätt: Produkten är avsedd för lokal användning på munslimhinnan. Tvätta händerna noggrant före användning. Applicera en liten mängd gel (1–2 droppar) på det drabbade området med applikatorn utan direkt kontakt med såret. Om området är svåråtkomligt kan produkten appliceras med en steril gasbinda eller en ren finger.

Undvik att röra det behandlade området med tungan i minst 3 minuter för att låta skyddsfilmen bildas. Skölj inte munnen, drick inte och ät inte i minst 30–60 minuter efter applicering.

Använd aftagelen endast tills symtomen försvinner, dock högst i 14 dagar.

4. Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Om symtomen inte lindras inom 14 dagar eller förvärras, avbryt användningen och kontakta läkare. Om du är gravid, ammar, misstänker graviditet eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan användning. För hygieniska skäl och för att förhindra smittspridning ska varje produkt endast användas av en person. Använd inte produkten efter utgångsdatum eller om förpackningen är skadad.

Kontraindikationer:

Överkänslighet (allergi) mot någon av produktens ingredienser.

Får inte användas i ögonen eller öronkanalen.

Får inte användas vid stora sår (10–20 mm smärtsamma sår).

Får inte användas vid svår kronisk aftös stomatit.

Varning:

Förvara utom räckhåll för barn.

5. Förvaring:

Förvara i originalförpackningen vid 15–25 °C.

6. Innehåll:

högmolekylärt natriumhyaluronat. Hjälpämnen: renat vatten, glycerin, xylitol, hydroxyetylcellulosa, bensalkoniumklorid, kaliumsorbat, dinatriummedetat, mintarom, citronarom

7. Förpackningsbeskrivning:

Aftavexx® gel 15 ml är förpackad i en plasttub som innehåller 15 ml gel.

Förpackningen innehåller: en kartongförpackning, en 15 ml tub med tryck samt bruksanvisning.



Gofarm Sp. z o.o. Sp.k. Górników street 21/26
30-819 Cracow, Polen
www.gofarm.pl



Aboutmeds Oy, Esbo, Finland
info@aboutmeds.fi
www.aboutmeds.fi

Betydelserna av symbolerna på förpackningen:

	Tillverkare		Batchnummer		Temperaturgränser
	Distributör		Läs bruksanvisningen		Medicinteknisk apparat
	Sista användningsdag		Använd inte om förpackningen är skadad		Katalognummer