



PREGNAID®- emätingeeli – PAKKAUSSELOSTE

Sen koostumuksen on osoitettu:

- Tuottavan optimaaliset olosuhteet siittiösoluille
- Edistävän pH-arvon säilymistä luonnolliseen hedelmöitykseen sopivana
- Omaavan siemennesteen kanssa yhteensopivan osmolaalisuuden

PREGNAID® on emätingeeli, joka ei tahraa, sisältää käyttötarkoitukseen soveltuvia säilöntäaineita. Ei sisällä parabeneja, silikoneja eikä mineraaliöljyjä.

Käyttöohjeet:

Tuotetta tulee käyttää ovulaatiovaiheen aikana, erityisesti kuukautiskierron hedelmällisimpinä päivinä (13.-15. päivä).

Laitetaan 5 minuuttia ennen sukupuoliyhdyntää.

1. Riko kertakäyttöisen annostelijan kanyylin päässä oleva sulkuviiviste
2. Aseta kertakäyttöisen annostelijan kanyyli emätinkanavaan
3. Paina annostelija kunnes tuubi on täysin tyhjä
4. Hävitä kertakäyttöannostelija käytön jälkeen

Tuotetta suositellaan käytettäväksi kerran päivässä tai useammin lääkärin ohjeen mukaan.

Koostumus:

Vesi, glukoosi, fruktoosi, natriumhyaluronaahti, magnesiumsitraatti, kalsiumpyruvaatti, sorbitoli, maitohappo, sitruunahappo, inositol, kaliumsitraatti, natriumbikarbonaatti, sinkkiglukonaatti, karnitiini, kreatiini, natriumkloridi, DMDM-hydantoiini, natriumhydroksidi, fenoksietanoli, etyyliheksyyliyliseriini, hydroksietyyliselluloosa.

Varoitukset:

- Säilytä lasten ulottumattomissa
- Kertakäyttöiset annostelijat: jokaisen tuubin sisältö on tarkoitettu yhteen käyttökertaan
- Säilytä tuote hyvin suljetuna, suojassa valolta ja lämmönlähteiltä
- Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen
- Viimeinen käyttöpäivämäärä pätee vain oikein säilytetylle tuotteelle
- Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vahingoittunut tai avattu
- Tuote ei ole steriili

- Tuote ei ole ehkäisyväline
- PREGNAID® -geelillä ei ole siittiötä tuhoavaa (spermisidistä) vaikutusta
- Älä käytä, jos limakalvot ovat vaurioituneet, leikkauksen jälkeen tai akuuteissa emätintulehduksissa
- Ei saa niellä
- Vältä tuotteen joutumista silmiin
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on todettu yksilöllinen yliherkyys sen sisältämillä aineosille
- Älä käytä tuotetta yhdessä kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden kanssa
- Varoitusten ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai kertakäyttöisen annostelijan uudelleenkäyttö voi heikentää tuotteen tehoa, pahentaa olemassa olevia ongelmia tai aiheuttaa uusia haittoja
- Imettävien naisten tulisi käyttää geeliä vain todellisen tarpeen mukaan ja lääkärin välittömässä valvonnassa
- Älä käytä tuotetta yli 30 peräkkäisenä päivänä
- On tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkiin, jos ilmenee muita haittavaikutuksia, joita tässä pakkausseosteessa ei mainita

Haittavaikutukset:

Normaalissa ja ennakoitavissa olevassa käytössä ei tällä hetkellä tunneta haittavaikutuksia, jotka liittyisivät erityisesti tämän tuotteen käyttöön. Yhteensopivuus on varmistettu, mutta ärsytys- tai allergiaoireiden ilmaantuessa lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin/gynekologiin.

Pakkaus:

6 kertakäyttöistä 5 ml annostelijaa

 Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro 1, - 25124 Brescia - Italia

Jakelija:

Aboutmeds Oy, Espoo, Suomi,
info@aboutmeds.fi



0426



PREGNAID® vaginalgel – BIPACKSEDEL

Dess sammansättning har visat sig:

- Skapa en optimal miljö för spermier
- Hjälpa till att bibehålla pH-värde lämpligt för naturlig befruktning
- Uppnå en osmolalitet som är kompatibel med sädesvätskan

PREGNAID® är en vaginalgel som inte fläckar, innehåller konserveringsmedel lämpliga för ändamålet och som är fri från parabener, silikoner och mineraloljor.

Bruksanvisning:

Produkten ska användas under ägglossningsfasen, särskilt under cykelns mest fertila dagar (dag 13–15). Införs 5 minuter före samlag.

1. Bryt förseglingen på spetsen av engångsapplikatorns kanyl
2. För in engångsapplikatorns kanyl i slidkanal
3. Tryck ut hela innehållet
4. Kassera applikatorn efter användning

Rekommenderad användning är en gång per dag eller oftare, enligt läkares anvisning.

Sammansättning:

Vatten, glukos, fruktos, natriumhyaluronat, magnesiumcitrat, kalciumpyruvat, sorbitol, mjölksyra, citronsyra, inositol, kaliumcitrat, natriumbikarbonat, zinkglukonat, karnitin, kreatin, natriumklorid, DMDM-hydantoin, natriumhydroxid, fenoxietanol, etylhexylglycerin, hydroxyetylcellulosa.

Varningar:

- Förvaras oåtkomligt för barn
- Engångsapplikatorer: varje tub är avsedd för engångsbruk
- Förvara produkten väl tillsluten, skyddad från ljus och värmekällor
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet enligt bipacksedeln.
- Utgångsdatum gäller endast om produkten förvaras korrekt
- Använd inte produkten om förpackningen är skadad eller öppnad
- Produkten är inte steril
- Detta är inte ett preventivmedel
- PREGNAID®-gelén har ingen spermiedödande (spermicid) effekt

- Använd inte om slemhinnorna är skadade, efter operation eller vid akuta vaginala infektioner
- Får ej sväljas
- Undvik kontakt med ögonen
- Använd inte produkten om du är överkänslig mot någon av ingredienserna i produkten
- Använd inte tillsammans med kvaternära ammoniumföreningar
- Underlåtenhet att följa varningarna, eller användningssätten, eller att återanvända samma engångsapplikator kan försämra produktens effektivitet, förvärra befintliga besvär eller orsaka nya oönskade effekter
- Ammande kvinnor bör endast använda gelén vid verkligt behov och under läkares direkta övervakning
- Använd inte produkten under mer än 30 på varandra följande dagar
- Det är viktigt att kontakta läkare eller apotek om du upplever biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel

Biverkningar:

Vid normal och rimlig förväntad användning finns det för närvarande inga kända biverkningar specifikt kopplade till denna produkt. Dess kompatibilitet har verifierats, men vid tecken på irritation eller allergiska reaktioner, avbryt användningen och kontakta din läkare/gynekolog.

Förpackning:

6 engångsapplikatorer à 5 ml

 Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro 1, – 25124 Brescia – Italien

Distributör:

Aboutmeds Oy, Esbo, Finland,
info@aboutmeds.fi



0426